



# Polofil Supra · Solobond M

ДВА СИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛА ДЛЯ НАДЕЖНОЙ  
РЕСТАВРАЦИИ

# Polofil Supra

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ

Полофил Супра – это светоотверждаемый микрогибридный композит наивысшего качества. В его основу положена проверенная временем система синтраглас-мультинаполнителя от компании VOCO. Благодаря превосходной эстетике и отличным физическим характеристикам композит Полофил Супра во уже много лет пользуется международным успехом.

### Отличные физические характеристики

Благодаря содержанию наполнителя примерно 76,5 вес.-% Полофил Супра является композитом, который может универсально применяться для выполнения эстетичных реставраций в области фронтальных и боковых зубов. Наполнитель представлен микро- и макрочастицами. Размер частиц микронаполнителя составляет при этом 0,05 мкм, макронаполнитель состоит из частиц размером от 0,5 до 2 мкм. Вследствие высокого содержания наполнителя Полофил Супра обладает превосходными физическими характеристиками. Прежде всего, низкая полимеризационная усадка и высокая устойчивость к абразии, а также высокая прочность на изгиб обеспечивают долговечность и стабильность пломб.

Технические данные	
Прочность на изгиб	140 МПа
Прочность на сжатие	360 МПа
Прозрачность	нейтральный
Рентгеноконтрастность	200 % Al
Водопоглощающая способность	22.9 $\mu\text{g} / \text{mm}^3$
Растворимость в воде	0.1 $\mu\text{g} / \text{mm}^3$
Полимеризационная усадка	2.6 % vol.
Устойчивость к окрашиванию	отсутствие окрашивания

### Долговечная эстетика и естественный блеск

Полофил Супра выпускается в семи эстетичных оттенках. После проведения полимеризации и полировки, реставрации практически больше не отличаются от натуральных тканей зуба. Достигнутый блеск гарантирует долговечность отличных эстетических результатов во фронтальном и боковом участке.

### Простота в обращении

Скорость работы на ежедневном приеме обеспечивается, прежде всего, материалами, поддерживающими рентабельность работы врача-стоматолога. Благодаря высокой степени толерантности к операционному свету во время моделировки, нелипкой консистенции и хорошей штопфируемости и моделируемости, Полофил Супра гарантирует быструю и комфортную работу.

Кроме того, рентгеноконтрастность Полофила Супра, составляющая 200 %Al, позволяет легко отличать на рентгеновском снимке реставрацию от твердых тканей зуба.

### Надежная и эстетичная реставрация с Полофил Супра



Исходная ситуация



После препарирования



Готовая реставрация из Полофил Супра

## Solobond M

### НАДЕЖНЫЙ TOTAL-ETCH-БОНДИНГ

Солобонд М – это светоотверждаемая Total-Etch адгезивная система для всех светоотверждаемых материалов. Однокомпонентная адгезивная система, наносимая одним слоем, гарантирует быструю работу в сочетании с надежностью применения и превосходными показателями сцепления к эмали и дентину.

#### Быстрая и простая работа

Наносимая лишь одним слоем Total-Etch адгезивная система предлагает Вам много преимуществ. Используя Солобонд М, Вы проводите праймирование и бондинг твердых тканей одним этапом, выполняя лишь однократную аппликацию. Таким образом, Вы достигаете значительной экономии времени и материала в сравнении со многими двухэтапными системами. Кроме того, использование Солобонда М исключает вероятность ошибки при смешивании.

Еще одно положительное свойство – это «эффект немедленного приклеивания». Пломбировочный материал сразу же приклеивается к поверхности зуба, обработанной адгезивной системой и, таким образом, облегчает последующую моделировку.


#### Качество, доказанное клиническими исследованиями

Различные исследования доказали качество и, особенно, превосходную адгезию и плотность краевого прилегания реставраций, зафиксированных на Солобонд М. В рамках представленного ниже клинического исследова-

ния<sup>1</sup>, проведенного в университете г. Лейпциг в 2001 году, на протяжении 3-х лет изучалось качество выполненных реставраций. При этом, Солобонд М применялся вместе с традиционным фотополимерным композитом. Изучение состояния реставраций проводилось через 3, 12, 18, 24 и 36 месяцев, их оценка проводилась согласно модифицированным USPHS-критериям<sup>2</sup>. Результаты исследования показывают, что через три года лишь в двух из 53 случаев наблюдалась потеря реставрации. Вторичный кариес не был выявлен ни в одном из обследованных зубов.

#### Обзор преимуществ

- Один компонент – одна аппликация
- Превосходная адгезия (28,1/32,0 МПа к дентину/эмали)<sup>3</sup>
- Высокая эластичность материала и долговечная плотность краевого прилегания
- Эффект немедленного приклеивания» упрощает аппликацию пломбировочного материала
- Универсальное применение со всеми фотополимерными пломбировочными материалами

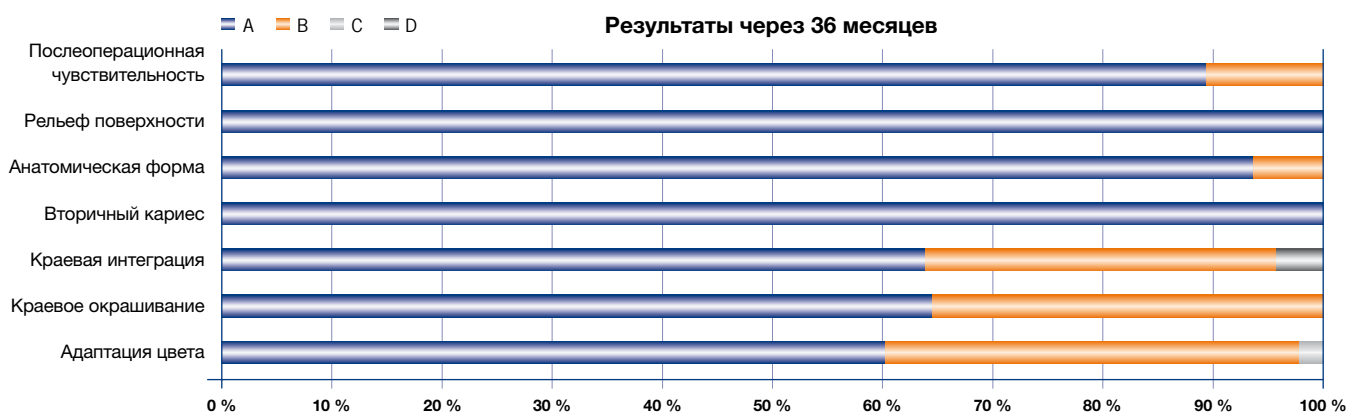

#### Итог

В представленном исследовании: через 3 года после их выполнения реставрации еще отвечали 18-месячным критериям «Full acceptance» Американской Стоматологической Ассоциации (ADA).

<sup>1</sup> G. Haßloff, M. Erler, H. Schneider, K. Merte, Университет г. Лейпциг, отчет для компании VOCO

<sup>2</sup> United-States-Public-Health-Service

<sup>3</sup> Аналог Reinhardt, Philip Journal 3 – 4, 1997, 101 – 104

## Polofil Supra · Solobond M

### ДВА СИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛА ДЛЯ НАДЕЖНОЙ РЕСТАВРАЦИИ

#### Polofil Supra

##### Показания

- Эстетичные пломбы во фронтальном и боковом участке
- Восстановление травматически поврежденных фронтальных зубов
- Облицовка измененных в цвете фронтальных зубов
- Коррекция формы и цвета для улучшения эстетики
- Шинирование подвижных фронтальных зубов
- Расширенная герметизация фиссур в молярах и премолярах
- Починка фасеток
- Восстановление культей зубов
- Композитные Inlays



##### Форма выпуска Polofil Supra

- REF 1360 Комплект: 7 шприцов по 4 г (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, I), 5 мл геля Вокоцид, 4 мл Солобонд М, принадлежности
- REF 1373 Трисет: 3 шприца по 4 г (A2, A3, A3.5), 3 мл геля Вокоцид, 4 мл Солобонд М, принадлежности

##### Шприцы по 4 г в следующих оттенках

- |          |                                    |          |    |
|----------|------------------------------------|----------|----|
| REF 1361 | A1                                 | REF 1365 | B2 |
| REF 1362 | A2                                 | REF 1366 | B3 |
| REF 1363 | A3                                 | REF 1368 | I  |
| REF 1364 | A3.5                               |          |    |
| REF 2107 | Шприцы по 4 г в следующих оттенках |          |    |

#### Solobond M

##### Показания

- Солобонд М предназначен для прямых реставраций с использованием фотополимерных пломбировочных материалов



##### Форма выпуска Solobond M

- REF 1225 Комплект: флакон 4 мл, 5 мл геля Вокоцид, принадлежности
- REF 1226 2 флакона по 4 мл
- REF 1227 флакон по 4 мл

VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Straße 1-3  
27472 Cuxhaven  
Германия

Tel.: +49 (0) 4721-719-0  
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com  
www.voco.com

Представлено: